

# PODUSZKA ORTOPEDYCZNA MR CLASSIC PLUS

## INSTRUKCJA UŻYWANIA



Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej. W celu prawidłowego stosowania wyrobu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek podanych w instrukcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Poduszkę należy stosować zgodnie z przewidzianym przez producenta zastosowaniem.

### INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i Prezesowi URPLWMIiPB

### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

- Poduszka przeznaczona jest dla osób, które cenią sobie komfort oraz dbają o przyjmowanie prawidłowej pozycji podczas leżenia i snu
- Poduszka powoduje utrzymanie anatomicznych krzywizn kręgosłupa oraz stabilizację i rozluźnienie mięśni przykręgosłupowych
- Poduszkę można stosować profilaktycznie, a także podczas procesu rehabilitacyjnego zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty
- Poduszka ma zastosowanie przy niespecyficznym bólu karku, szyi, głowy, ramion, przy problemach z napięciem nerwowym i drętwieniem dłoni
- Poduszkę można stosować przy zwyrodnieniach stawów międzykręgowych kręgosłupa szyjnego oraz zmianach dyskopatycznych kręgosłupa szyjnego
- Poduszkę można używać w pozycji leżącej na wznak, na boku, na brzuchu, umieszczając ją pod odcinek szyjny kręgosłupa

### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Wymiary: 32x45x12/14 [cm] (możliwość regulacji wysokości poduszki poprzez 2 cm wkładkę z pianki poliuretanowej)
- Materiał wewnętrzny: dzianina żakardowa 40% bawełna + 60% PES posiada certyfikat OEKO-TEX
- Materiał zewnętrzny: tkanina satyna 100% bawełna posiada certyfikat OEKO-TEX
- Wypełnienie poduszki 100% pianką viscoelastyczną z atestem higienicznym oraz certyfikatem OEKO-TEX
- Poszycie materiałowe zewnętrzne wyposażone w zamek

### OSTRZEŻENIA I PRZECIWWSKAZANIA:


- W przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa przed stosowaniem poduszki skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą
- Poduszka jest wyrobem osobistego użytku, przeznaczonym do wielokrotnego użycia; w celu zapewnienia właściwych warunków higienicznych, wyrób nie może być używany przez inne osoby

### KONSERWACJA:

- Nie doprowadzać do silnego zabrudzenia, w razie konieczności bawełnianą poszewkę można prać w temperaturze do 40 °C
- Podczas użytkowania wyrobu, nie można dopuścić do jego zawilgocenia lub przemoczenia; nie stosować w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności
- Przechowywać i stosować w miejscach nie narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych; nie wystawiać poduszki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, może to doprowadzić do zmiany barwy poszycia, jednak bez wpływu na właściwości wyrobu

### SPOSÓB UŻYCIA:

- Wyrób powinien być stosowany bezpośrednio pod głowę na odcinku szyjnym, podczas odpoczynku lub snu
- Poduszka ortopedyczna jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia.
- Poduszkę należy zawsze stosować powleczoną w bawełnianą poszewkę
- Wyrób należy użytkować z przewidzianym zastosowaniem, zaleceniami i wskazówkami podanymi w instrukcji użytkowania

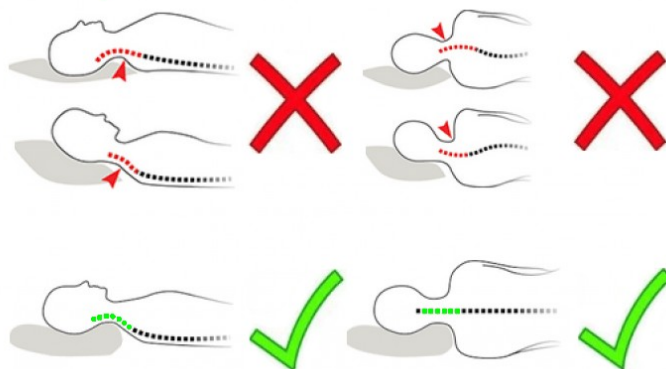

WYRÓB MEDYCZNY

Termin przydatności do użycia wynosi 7 lat od daty produkcji



### Producent:

PODMED Bartosz Łętowski  
ul. Wilcza 56 lok. 6  
43-600 Jaworzno, Polska  
tel. +48 502606366  
www.podmed.pl



Data edycji: 30.07.2021

Wersja: vIUCP300721